


## INSTRUCCIONES PARA PLANCHA IMAKO

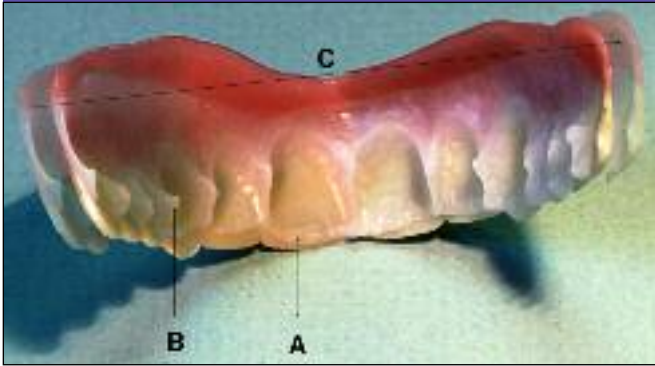

**Cómo se ajusta** - Una impresión exacta de sus dientes deberá ser creada utilizando el material de moldura. Coloque levemente por debajo de sus dientes. Imako se ajusta mecánicamente, sin adhesivos.

- A) Un pequeño borde por debajo de la impresión frontal proporciona tensión a la plancha, y ayuda a estabilizarla en su sitio.  
 B) Puntos entre los dientes ayudan a fijar la plancha a sus dientes.  
 C) Flexione Imako hacia afuera para colocar y quitar. El paquete incluye: plancha Imako, material termoplástico del color de las encías y dientes, y estuche.

Por favor lea todas las instrucciones antes de comenzar. Tenga los siguientes artículos a la mano en su cocina: espejo, agua a hervor lento, tijera afilada, recipiente de vidrio o cerámica, cuchillo afilado, y posiblemente aceite vegetal (vea dentaduras)

Imako es un producto cosmético, no terapéutico. No se recomienda el uso para comer alimentos sólidos. Se puede usar mientras injiere líquidos fríos o al fumar cigarrillos\*. La plancha se puede ajustar en cualquier momento calentando el material de moldura.  
 \*El cigarro mancha Imako.

**Frenillos/Dentaduras Postizas** - ¡No coloque Imako sobre frenillos o dentaduras postizas!

**Ajuste de la Plancha** - coloque la plancha, jale el labio superior hacia abajo mientras mantiene la plancha fija. Si siente dolor, haga un corte un poco más profundo en la parte superior y central de la ranura.

**Dentaduras** - para prevenir que la plancha se pegue, frote la superficie del material de moldura con aceite vegetal.

**Esmalte de uñas** - el material de moldura de Imako se pega al esmalte de uñas al estar derretido. Evite contacto o remueva el esmalte.

## INSTRUCCIONES PARA CREAR LA PLANCHA



### Aumente el Area de la Encía:

lave sus manos, cepille sus dientes y utilice hilo dental, enjuague su boca con mentol o con agua caliente con sal. Derrita un pedazo del material termoplástico en el recipiente de cerámica con agua a hervor lento. Humedézcase las manos. Remueva el plástico con un utensilio de cocina. Frote en las palmas de las manos para formar una columna estrecha (tamaño de espagueti) de 3 pulgadas de largo. Manténgalo plegable sumergiéndolo en el agua caliente. Sumerja la parte superior de la plancha Imako en agua caliente para derretir la esquina superior del soporte termoplástico. Una columna delgada a lo largo de la orilla superior. (El plástico derretido se unirá al plástico derretido).

**Sumerja** la plancha Imako en agua a hervor lento. La plancha se aplanará cuando el material termoplástico se suavice.

**Prueba:** remueva Imako del agua y coloque Imako en su boca en la posición deseada, utilizando un espejo. Primero coloque la plancha en el centro, luego asegúrese que esté a nivel. Cuando esté satisfecho, presione Imako lo más cerca a sus dientes y encías que le sea posible (excepto contra los dientes hundidos). Haga presión por afuera del labio para alisar el material termoplástico contra sus encías. Aguante la posición, sin mover, por **dos minutos**.



**Permita que Endurezca** - cuando sienta que el material le comienza a ajustar, separe delicadamente para remover. Deje que el

material termoplástico endurezca (cambie a color blanco) a temperatura ambiente, aproximadamente tres minutos.

Si el plástico está muy suave para mantener la forma de arco, ayúdele. ¡No permita que la impresión seque por completo en su boca! **Peligro: si no puede remover la impresión fácilmente de su boca, enjuague su boca con agua lo más caliente que pueda soportar para suavizar el material de moldear. NO haga fuerza.**

**Ajuste:** Pruébese la plancha creada. Si no le cabe bien, derrita parcialmente el material de moldura sumergiéndolo en agua caliente y colocándose la plancha nuevamente. El material de moldura se puede derretir una y otra vez, cuantas veces sea necesario, hasta que esté satisfecho con la plancha.

**Material Excedente:** pele, corte y deseche el material de moldura que sobresale por adelante.

**Recorte:** Usted deberá cerrar su mordida cómodamente sin sentir interferencia con la superficie de sus dientes. Use el cuchillo afilado para rebajar poco a poco el material que le impida morder apropiadamente.

**Puntos Interproximales** - puntas afiladas podrán formarse donde dos dientes se unen a las encías. Corte estos con una tijera afilada para asegurar comodidad.

**Añadiendo Dientes Falsos:** Agregue material termoplástico de color dental donde le falten dientes para reforzar y fortalecer la plancha Imako. Vaporice brevemente esa área de la plancha. Con la plancha en su boca, presione una pequeña cantidad de material termoplástico derretido hacia la plancha, sus encías y dientes adjuntos. Los dientes falsos que desea crear no deberán traslapar los dientes aledaños dentro de la cavidad bucal. Comience utilizando poco material termoplástico porque es fácil añadir más, pero será difícil rebajar el material excedente. Después de aplicar los dientes falsos, muerda para asegurar que no afecte su mordida



### Ejemplos de impresiones para dentadura incompleta.

Asegúrese que pueda flexionar la plancha hacia afuera para removerla. Nunca envuelva el plástico por detrás de sus dientes.

1. Coloque dientes falsos junto a dientes aledaños, pero no los traslape.
2. Un gancho colocado por debajo de los dientes frontales mantiene la plancha en su sitio.
3. Si le faltan muelas, puede formar un gancho al rededor de sus dientes posteriores.
4. Tres dientes falsos creados con material de moldura.
5. Dientes individuales creados para encajar en su posición.

original. ¡¡¡Precaución: puede ocasionar daños graves a sus dientes originales aledaños al diente falso creado si este es de tamaño y forma incorrecta, así que tenga mucho cuidado!!!

**Cuidado y Mantenimiento** - Manténgase lejos del fuego, como autos encendidos o secadoras de ropa. No beba líquidos muy calientes mientras este usando Imako. Mantenga lejos de mascotas. Limpie Imako con alcohol diariamente. Para remover manchas, remoje durante la noche con 3 tabletas de Polident Overnight Whitening. Para disminuir incidentes de manchas, cubra el frente con esmalte de uñas transparente después de probárselas. Apunte una fosforera hacia abajo y seque brevemente el esmalte con la llama, sujetando Imako debajo de dicha llama.

**Fumar** - mancha Imako. Evite fumar mientras en uso, pero si tiene que hacerlo, coloque el final del cigarrillo detrás de la cubierta de Imako al inhalar.

**Garantía** - Devuelva con el recibo al comerciante dentro de los 30 días después de la compra para devolución/intercambio. Manchas causadas por el cigarro no califican como razón para devolución. Una cuota de almacenamiento de \$15 será cobrada si la parte posterior de la plancha está dañada. Estas son descartadas por razones de sanidad.

Fabricado por **Dr. Bukk, Inc.**



704 Old Belair Rd. •  
 Grovetown GA 30813 •  
 1.800.925.2855.  
 www.imako.net